
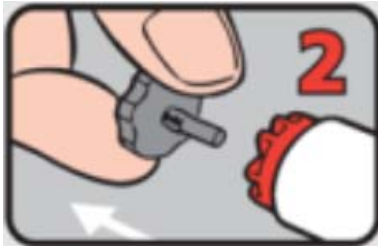
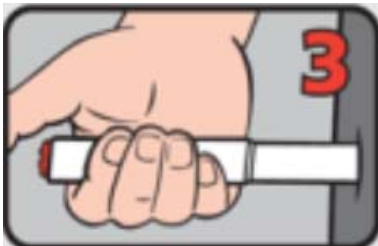



## Administration ANAPEN 0,3 mg/0,3 ml



1		Enlever le bouchon noir de protection de l'aiguille
2		Enlever le bouchon gris de sécurité du bouton rouge déclencheur
3		Maintenir fermement l'extrémité ouverte de l'auto injecteur (contenant l'aiguille) sur la face antéro-externe de la cuisse. En cas d'extrême urgence, l'injection est possible à travers un vêtement pas trop épais
4		Appuyer sur le bouton rouge déclencheur de façon à entendre un "clic", maintenir en position pendant 10 secondes puis retirer
5	Masser légèrement la zone d'injection	
6	Eliminer le stylo dans un conteneur à aiguille	

Date :

Signature MT

Signature IDEST